


DERMADRY

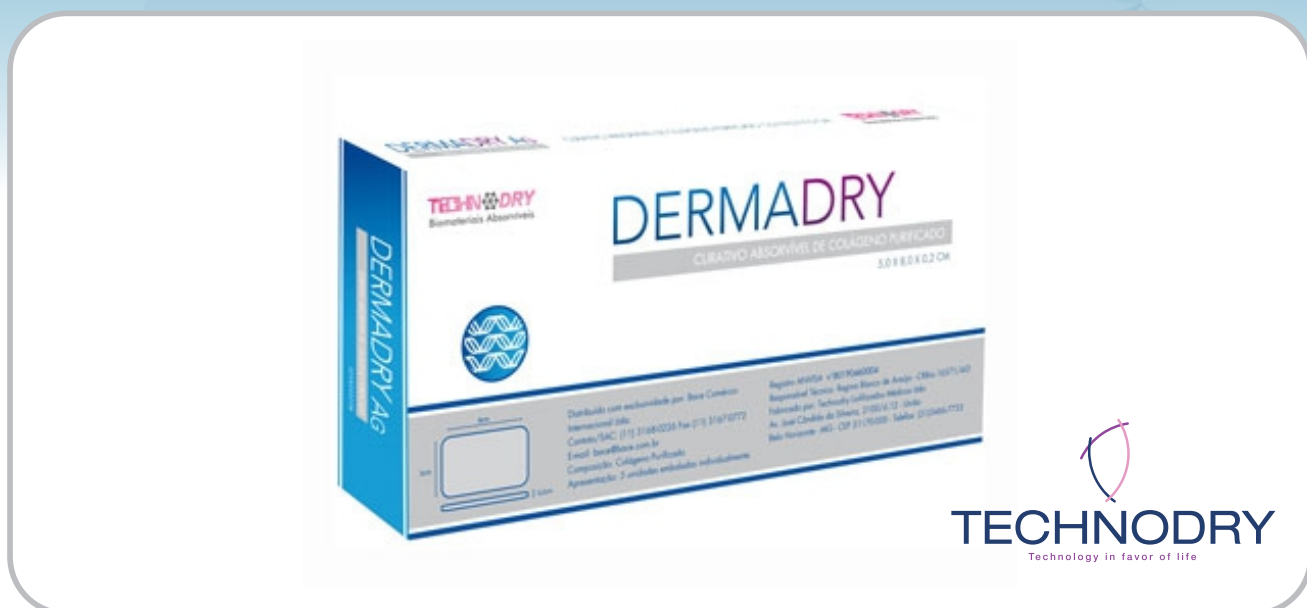

Descrição

Curativo biointegrável, estéril, de esponja colágeno Tipo 1. Auxilia no processo de cicatrização da ferida, promovendo um ambiente (quimiotático) de atração pelos macrófagos onde o seu acúmulo é o responsável pela formação do tecido de granulação.

Indicação

Indicado para feridas que podem estar infectadas ou colonizadas, em qualquer fase do processo de cicatrização.

Composição

Colágeno Tipo 1.

Apresentações

Tamanho do Produto	Quantidade por caixa
3 x 5 x 0,2 cm	5
5 x 8 x 0,2 cm	5
10 x 10 x 0,2 cm	5

Curativos embalados individualmente em grau cirúrgico.

Instruções de uso

Lavar a ferida com solução fisiológica 0,9%. Secar a pele ao redor da ferida. Remover o exsudato e tecido desvitalizado, se necessário. Aplicar Dermadry AG, no tamanho que melhor se adequar ao leito da ferida e diretamente sobre esta, excedendo as bordas em +ou - 1cm. Ocluir com cobertura secundária.

Caso necessário irrigar com soro fisiológico para auxiliar na remoção. Feridas secas devem ser irrigadas previamente com água estéril. Verificar o curativo e a pele circundante

frequentemente quanto a sinais de vazamento do exsudato ou sangramento excessivo, evitando assim a maceração da pele.

Tempo de troca

O curativo deverá ser trocado entre 24 e 72 horas, dependendo da capacidade de absorção do organismo.

Precauções

Não utilizar em pacientes com sensibilidade ao material de origem bovina ou a prata. Não deve ser usado para fechamento de incisões cirúrgicas pois pode interferir na cicatrização por ação mecânica ou para implantação cirúrgica.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 2 anos

Fabricante: Technodry Liofilizados Médicos LTDA-Brasil

Registro Anvisa: 80190460004

Distribuído por: Bace Comércio Internacional LTFA

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

